
Tissue-Tek VIP® 6 AI
Próżniowy procesor tkanek

*Wyobraź sobie... wyższy
poziom niezawodności,
bezpieczeństwa i wygody.*



continuous innovation for pathology





Tissue-Tek VIP® 6 AI

Procesor próżniowo-ciśnieniowy Tissue-Tek VIP 6 AI jest oparty na technologii, która od pokoleń jest uznawana za złoty standard niezawodności i bezpieczeństwa w przetwarzaniu tkanek. Procesor VIP 6 AI wyznacza nowy poziom komfortu oraz bezpieczeństwa tkanki i użytkownika, z którego słynie seria VIP.

Do Waszego laboratorium: Procesor Tissue-Tek VIP 6 AI:

- Zaufanie do technologii uznawanej za złoty standard
- Zalecane protokoły Sakura zapewniają wysoką jakość przetwarzania
- Zaawansowane bezpieczeństwo tkanek i personelu
- Niezawodne działanie

Gdy niezawodność i bezpieczeństwo spotykają się z jakością.




Tissue-Tek VIP® 6 AI



MAIN POWER





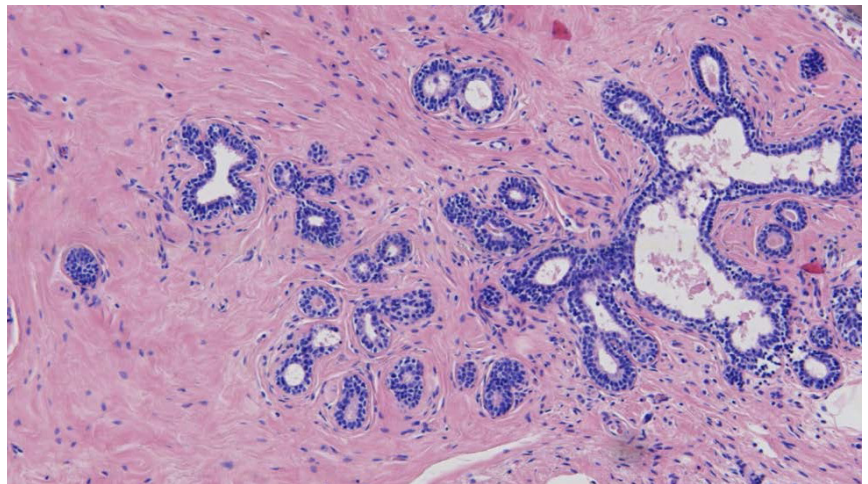

Wysoka jakość przetwarzania

Opracowano szereg zalecanych protokołów w celu uzyskania wysokiej jakości bloczków. Są to zarówno ksylenowe, jak i bezksylenowe protokoły do biopsji, rutynowych badań 1-dniowych i tkanki tłuszczowej.



Niezawodność

Procesor Tissue-Tek VIP 6 AI został zaprojektowany i skonstruowany z myślą o niezawodności, tak aby użytkownicy mieli pewność, że zawsze mogą na niego liczyć.

Dzięki wsparciu serwisowemu Sakura można mieć pewność, że urządzenie jest serwisowane zgodnie z wysokimi standardami Sakura Finetek. Przy każdej interwencji serwisowej i corocznej konserwacji zapobiegawczej stosuje się oryginalne części Sakura. Do realizacji tej usługi wyznaczani są wyłącznie przeszkoleni i certyfikowani przez producenta inżynierowie, co jest zgodne z wymogami ISO. Teraz Sakura oferuje usługę iSupport do procesorów Tissue-Tek VIP 6 AI, co dodatkowo zwiększa ich niezawodność. Ten zdalny system monitorowania w czasie rzeczywistym skraca czas, w jakim system może zostać naprawiony w przypadku nieoczekiwanej awarii.



Wyższy poziom bezpieczeństwa

Integralność próbki tkanki pacjenta i personelu laboratoryjnego ma olbrzymie znaczenie. Tissue-Tek VIP 6 AI chroni tkankę pacjenta podczas przetwarzania za pomocą zaawansowanego menedżera roztworów. Funkcja ta zabezpiecza integralność tkanki, zapobiegając wysychaniu, nawet w przypadku wykrycia niedoboru odczynnika. Automatycznie pobiera odczynnik z kolejnej stacji lub odczynnik z obu zbiorników. Teraz można mieć pewność, że cykl przetwarzania zostanie zakończony, eliminując zakłócenia w ciągu dnia pracy.

Dołączony system zarządzania odczynnikami Tissue-Tek VIP 6 AI i skuteczne filtry chronią pracowników laboratorium przed narażeniem na działanie niebezpiecznych oparów. To umożliwia pracownikom łatwą wymianę odczynników w trakcie przetwarzania. Dzięki temu na miejscu jest świeży odczynnik do danej próbki tkanki. Zminimalizowano narażenie na opary rozpuszczalnika i ręczne postępowanie z dużymi ilościami odczynników.



Kompleksowe rozwiązanie do przetwarzania

VIP 6 AI to rozwiązanie, które umożliwia bezpieczne przetwarzanie wszystkich rodzajów tkanek z niezmiennie wysoką jakością.

Połączenie VIP 6 AI z wysokiej jakości materiałami eksploatacyjnymi, takimi jak воск парафинowy Tissue-Tek®, i usługami Sakura, takimi jak platynowy kontrakt serwisowy VIP 6 AI lub szkolenie użytkowników VIP 6 AI, jeszcze bardziej zwiększa niezawodność, bezpieczeństwo i jakość kompleksowego rozwiązania dla Twojego laboratorium.

Materiały eksploatacyjne

Wosk parafinowy Tissue-Tek®

Sakura oferuje szeroką gamę wysokiej jakości wosków parafinowych, dostępnych w różnych rodzajach i rozmiarach opakowań oraz dla różnych zakresów temperatur.



Zamiennik ksylenu Tissue-Tek® Tissue-Clear®

Zamiennik ksylenu inny od wszystkich, ponieważ nie podrażnia skóry ani błony śluzowej i jest bezwonny.





Bulk Left



Odwiedź nas na stronie www.sakura.com

Sakura Finetek Poland sp. z o.o., Grójecka Offices,
ul. Grójecka 208, 02-390 Warsaw, Poland

