

*Imagínese... un nivel
superior de fiabilidad,
seguridad y comodidad.*

Tissue-Tek VIP® 6 AI

**Procesador de infiltración
por vacío**



continuous innovation for pathology





Tissue-Tek VIP® 6 AI

El procesador de infiltración por vacío Tissue-Tek VIP 6 AI, basado en generaciones de tecnología de referencia, es un método fiable y seguro para un procesamiento de alta calidad. Centrado principalmente en la comodidad, el tejido del paciente y la seguridad del usuario, el VIP 6 AI lleva la serie VIP al siguiente nivel.

Equipe su laboratorio con el Tissue-Tek VIP 6 AI:

- La confianza de una tecnología de referencia
- Los protocolos recomendados por Sakura proporcionan un procesamiento de alta calidad
- Seguridad avanzada del tejido del paciente y del personal
- Máxima fiabilidad

**Cuando la fiabilidad y la seguridad
se unen a la calidad.**




Tissue-Tek VIP® 6 AI



MAIN POWER





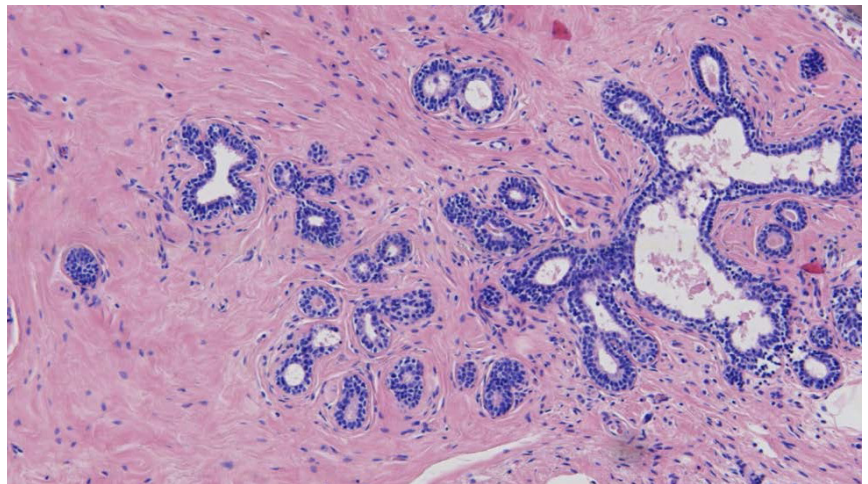

Procesamiento de alta calidad

Se han desarrollado una serie de protocolos recomendados para lograr bloques de alta calidad. Se incluyen los protocolos con xileno y sin xileno para biopsias, ciclos nocturnos rutinarios y muestras grasas.



Máxima fiabilidad

El Tissue-Tek VIP 6 AI se ha diseñado, desarrollado y construido para proporcionar al laboratorio un procesador de gran fiabilidad, con la seguridad de que el sistema está siempre a su disposición.

Con el servicio de asistencia de Sakura, puede tener la tranquilidad de saber que su instrumento se mantiene según los elevados requisitos de Sakura Finetek. En todas las tareas de servicio y en el mantenimiento preventivo anual se emplean componentes originales de Sakura. Este servicio solo lo pueden realizar ingenieros certificados y formados por el fabricante, con lo que se ayuda a mantener la conformidad con las normas ISO. Sakura ha mejorado aún más la fiabilidad con la presentación de iSupport para el Tissue-Tek VIP 6 AI. Este sistema de supervisión remota en tiempo real mejora la velocidad de reparación del sistema si se produce un fallo inesperado.



Seguridad de nivel superior

La integridad de las muestras de tejidos de los pacientes y el personal del laboratorio tienen la máxima importancia. El Tissue-Tek VIP 6 AI protege el tejido del paciente durante el procesamiento mediante el uso del gestor de soluciones avanzado. Esta función garantiza la integridad del tejido al evitar que se seque, incluso cuando se detecta una escasez de reactivo. Extrae automáticamente reactivo de la siguiente estación o de los dos depósitos de reactivo a granel. Ahora puede disfrutar de la tranquilidad de saber que el ciclo de procesamiento se completará eliminando las interrupciones en la jornada laboral.

El diseño cerrado del Tissue-Tek VIP 6 AI, su sistema de gestión de reactivos y sus eficaces filtros, protege al personal del laboratorio de la exposición a vapores peligrosos. Permite que su personal cambie fácilmente los reactivos mientras se realiza el procesamiento. Esto garantiza que haya reactivo nuevo para la muestra de tejido. Se minimiza la posible exposición a vapores de disolventes y la manipulación manual de grandes cantidades de reactivo.



Solución total para el procesamiento

El VIP 6 AI es la solución para procesar de manera fiable casos uniformes de alta calidad de todo tipo de tejidos.

La combinación del VIP 6 AI con consumibles de calidad, como la cera de parafina Tissue-Tek®, así como los servicios de valor añadido de Sakura, como el acuerdo de servicio VIP 6 AI Platinum o el servicio User Training VIP 6 AI, aumentan aún más la fiabilidad, la seguridad y la calidad que ofrece la solución total para el procesamiento de su laboratorio.

Consumibles

Cera de parafina Tissue-Tek®

Sakura ofrece una gran variedad de ceras de parafina de alta calidad, disponibles en varios tipos, tamaños de embalaje y rangos de temperatura.



Sustituto de xileno Tissue-Tek® Tissue-Clear®

Un sustituto de xileno que se caracteriza por no irritar la piel o la mucosa y no tener color.





Bulk Left



Visítenos en sakura.com

Sakura Finetek Spain, S.L.,
Ronda Sant Pere 17, 6-1, 08010 Barcelona, España

